

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16,
Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, 16690,
KOREA VABARIIK
Valmistatud Koreas

IVD

CE

Volitatud esindaja:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Germany
Turustaja:
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com
Kasutamiseks ainult *in vitro* diagnostikas
Ei ole ette nähtud enesetestimiseks

© 2020. Kõik õigused kaitstud.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Lühijuhend

See juhend annab ülevaate sellest, kuidas kasutada testi **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**.
Enne selle testi kasutamist lugege kasutusjuhendit.

0 9341404001 (02) 2020-12 ET

Hoiatus!

Järgige tervishoiu- ja ohutuseeskirju.


- Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
- Käideldge kõiki proove nii, nagu need sisaldaksid nakkustekitajaid.
- Pange tähele kõiki kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.

1 Testi ettevalmistamine



- Lugege hoolikalt testi **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test** kasutusjuhendit.



- Kontrollige aegumiskuupäeva fooliumümbrise tagaküljelt. Ärge kasutage testi, kui aegumiskuupäev on möödunud.

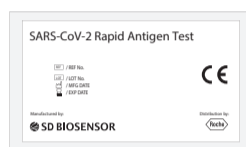

- Avage ümbris ning võtke testiriba ja kuivatusaine pakike välja.
- Veenduge, et testiriba oleks kahjustamata ja kuivatusaine indikaatori olek näitaks selle kehtivust (oleks kollane).

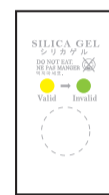
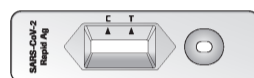


- Tehke kvaliteedikontroll kvaliteedikontrolli materjali kasutusjuhendi ja kohalike eeskirjade kohaselt.

2a Proovi võtmine ja ettevalmistamine (nasofarüingeaalne tamponiproov)

- Sisestage steriilne tampon patsiendi ninasõõrmesse ja keerutage tamponi 3–4 korda vastu ninaneelu pinda. Tõmmake tampon ninaõõnest välja.
- Pange tampon ekstraheerimispuhvri katsutisse. Keerutage tamponi üle 5 korra, samal ajal puhvri katsutit pigistades.
- Võtke tampon välja, samal ajal vedeliku tampoonist eemaldamiseks katsuti külgi pigistades.



- Suruge kork tihedalt katsutile. Jätkake jaotisega **3 Testi tegemine**.

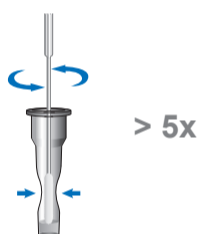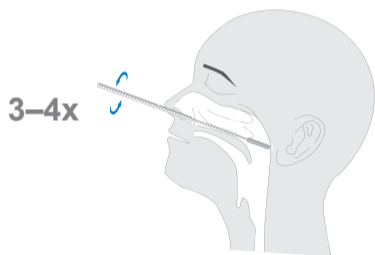

Märkus. Järgige kombineeritud ninaneelu-suuneelu proovi võttes kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

2b Viiruse transpordisöötmes oleva proovi ettevalmistamine

- Võtke kogumisnõust või viiruse transpordisöötme (VTM) mikropipetti kasutades 350 µl proovi. Segage proov näidatu kohaselt ekstraheerimispuhvriga.
- Suruge kork tihedalt katsutile. Jätkake jaotisega **3 Testi tegemine**.

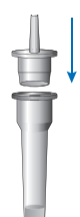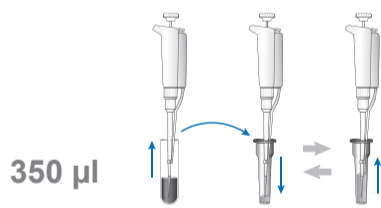


Märkus. Järgige tasakaalustatud soolalahust (HBSS) kasutades kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

3 Testi tegemine


- Pange testriba tasasele pinnale ja tilgutage testriba proovisüvendisse 3 tilka ekstraheeritud proovi 90° nurga all.
- Lugege testi tulemus 15 kuni 30 min pärast.

HOIATUS! Valetulemuste saamise oht. Ärge lugege testi tulemust pärast 30 min möödumist.

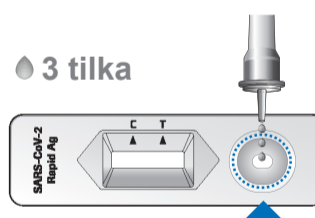

4 Tulemuste tõlgendamine


- Tulemuse akna ülemisse osasse ilmunud värvunud vööt näitab, et test on töökorras. See on kontrolljoon (C). Isegi kui kontrolljoon on nõrk, tuleks test lugeda õigesti tehtuks. Kui kontrolljoont ei ole näha, on test kehtetu.
- Positiivse tulemuse korral ilmub tulemuseakna alumisse osasse värvunud vööt. See on testijoon (T). Isegi kui testijoon on väga nõrk või ebaühtlane, tuleb testi tulemust tõlgendada positiivse tulemusena.

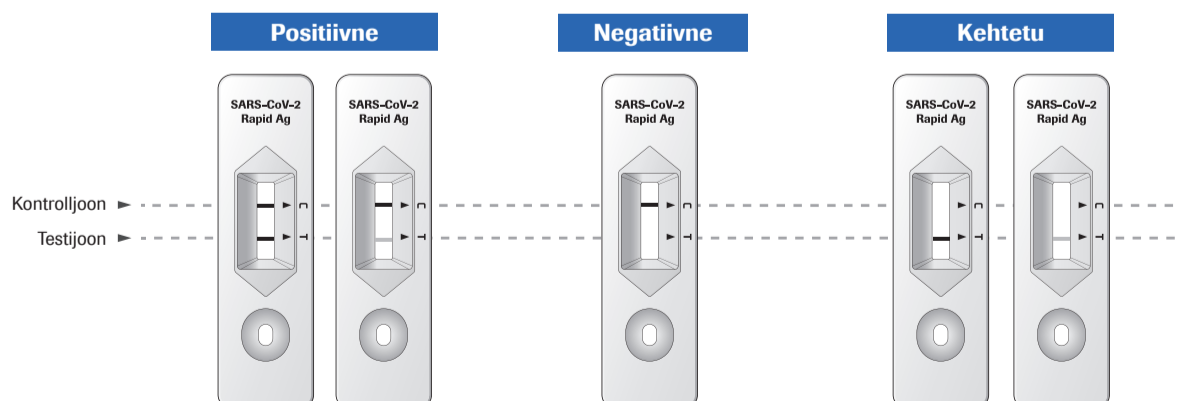

Testi toimivuse tagamine

Tehke parima toime tagamiseks nii.

- Kui testi tegemise kohas on tugev õhuringlus, kinnitage enne proovi lisamist kaasasolev kile testriba tulemusakna külge. See tagab proovi piisava liikuvuse.

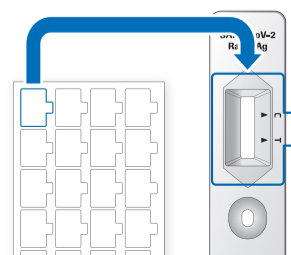

Märkus.

- Ükskõik kui nõrga testijoon esinemist koos kontrolljoonega tuleb tõlgendada positiivse tulemusena.
- Diagnostilistel eesmärkidel peab tulemusi alati hindama patsiendi anamneesi, kliinilise läbivaatuse tulemusi ja muid leide arvesse võttes.